



Patsiendi nimi: _____ M/N Isikukood/sünniaeg: _____

Tellija nimi: _____ Asutus: _____

Proov: seerum plasma Võtmise kuupäev ____ . ____ . ____ Kontingendikood ____Tellitud kinnitav uuring: (märgistage sobiv) HIV kinnitav HCV kinnitav HBV kinnitav

Esmase uuringu tellija : Arst _____ Asutus _____ kuupäev ____ . ____ . ____

Esmase uuringu teostanud asutus _____ Uuringu vastuse kinnitas _____		Teie laboris mõõdetud arvulised tulemused (märgige tulemus sobivasse lahtrisse)			
Esmase uuringu tulemused: (märgistage kõik tehtud uuringud)		Negatiivne	Nõrk positiivne	Tugev positiivne	Teostamise kuupäev
<u>Ag+Ab määramine</u>	<input type="checkbox"/> HIV Ab/Ag Combo, Architect, Abbott
(EIA, ECLIA, ELISA vms)	<input type="checkbox"/> HIV Combo, Centaur, Siemens
	<input type="checkbox"/> HIV Combi PT, Cobas e/Elecsys, Roche
	<input type="checkbox"/> HIV Combi, Cobas e/Elecsys, Roche
	<input type="checkbox"/> Anti-HCV, Architect, Abbott
	<input type="checkbox"/> HBsAg Qualitative II, Architect, Abbott
	<input type="checkbox"/> Muu test _____
<u>PCR</u>	<input type="checkbox"/> RealTime HIV-1, 2000i, Abbott
	<input type="checkbox"/> HIV-1 Test, TaqMan, Roche
	<input type="checkbox"/> TaqScreen MPX Test, Roche
	<input type="checkbox"/> Muu test _____
<u>Kiirtest</u>	nimetus _____

Kontingendikoodid ja nende tähendus:

- 108 Vere ja organite doonorid
- 109 Rasedad
- 111 Relvajõududes teenivad isikud
- 112 Kinnipidamiskohtades viibivad isikud
- 114 Anonüümselt uuritud
- 115 Tervishoiutöötajad
- 116 Profülaktiliselt uuritud

Proovi saatmise juhend:

1. Vereseerum tuleb saata geeliga eraldatuna avamata korgiga originaalkatsutis või vähemalt 1,0 ml seerumit 2,0 ml steriilses keeratava korgiga tuubis;
2. Vereplasma tuleb saata überpipeteeritult. Vähemalt 1,0 ml plasmat tuleb pipeteerida 2,0 ml steriilsesse keeratava korgiga tuubi;
3. Katsutid või tuubid peavad olema tihedalt suletud, vigastamata ja väljastpoolt puhtad ning kuivad;
4. Katsutid või tuubid peavad olema markeeritud patsiendi ees- ja perekonnanimega, või isikukoodiga, mis võimaldab proovimaterjali seostada saatekirjaga;
5. Geeliga seerumikatsuti tuleb tsentrifuugida peale verevõtmist ja tsentrifuugitud katsutit on lubatud säilitada temperatuuril 2-8 °C kuni 5 ööpäeva;
6. Plasma katsuti tuleb tsentrifuugida peale vere võtmist ja plasma pipeteerida eraldi tuubi. Eraldatud plasmat on lubatud säilitada temperatuuril 2-8 °C kuni 5 ööpäeva
7. Proovide transpordiks tuleb paigutada proovimaterjaliga nõu transportnõusse koos absorbeeriva materjaliga, et takistada proovimaterjali lekkimist. Uuringute saatekirjad paigutada eraldi ümbrikusse;
8. Seerumi ja plasma proove võib transportida toatemperatuuril;
9. Saatekiri peab olema selgelt vormistatud ja saatekirjal olevad andmed peavad olema täielikud. Saatekirjal peab olema kirjas HIV uuringu puhul kontingendi kood;
10. Saatekiri ei tohi olla proovimaterjaliga määrdunud.